


# Wichtiger Hinweis

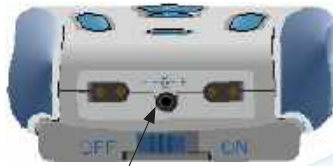

Ladebuchse

Bei Betrieb: Schalter auf "ON"  
Bei Ladevorgang : Schalter auf "OFF"

Das TENS Gerät ist mit einem leistungsfähigen Akku ausgestattet. Dieser ist dann aufzuladen, wenn auf dem Display das Symbol Akkuladung angezeigt wird.

Sinkt der Ladezustand des Akkus unter einen kritischen Wert ab, schaltet sich das Gerät aus.

Der Akku muss vor erneutem Gebrauch aufgeladen werden. Die Ladebuchse befindet sich vorne zwischen den Kabelanschlüssen.

Der Schiebeschalter unterhalb der Ladebuchse muss auf "OFF" gestellt werden. Nur so kann das Gerät geladen werden. Ist der Akku voll, wird das am Ladegerät angezeigt, die Leuchtdiode wechselt von rot auf grün.

Für den Betrieb muss der Schiebeschalter unterhalb der Ladebuchse wieder auf "ON " gestellt werden. Das Gerät ist nun wieder verwendungsfähig.

# TENS - Zubehör

Art.-Nr.	Artikel/Größe	Menge Stück	Preis/ Packung inkl.MwSt.	Preis ab 5 Packungen	Preis ab10 Packungen	Bestellmenge
281000	SKE 32 mm rund	4	€ 10,40	<b>-12% Rabatt</b>	<b>-20% Rabatt</b>	
282000	SKE 50 mm rund	4	€ 11,09			
283400	SKE 50 x 50 mm	4	€ 9,28			
281007	SKE 50 x 90 mm	4	€ 20,64			
281008	SKE 50 x 130 mm	4	€ 20,64			
283100	SKE 80 x 130 mm	2	€ 11,90			
107014	Stimulations Handschuhe Gr. S	1Paar	€ 14,40			
107021	Stimulations Handschuhe Gr. M	1Paar	€ 14,40			
107022	Stimulations Handschuhe Gr. L	1Paar	€ 14,40			
107023	Stimulations Socken Gr. M (38-40)	1Paar	€ 14,40			
107024	Stimulations Socken Gr. L (41-43)	1Paar	€ 14,40			
107067	Stimulations Socken Gr.XL (44-46)	1Paar	€ 14,40			
107049	1-20 Stimulationsmanschette Umfang 23-30 cm,1 Anschluss	2	€ 52,00			
107051	1-30 Stimulationsmanschette Umfang 28-40 cm,1 Anschluss	2	€ 71,00			
107052	1-35 Stimulationsmanschette Umfang 32-55 cm,1 Anschluss	2	€ 84,50			
107053	2-20 Stimulationsmanschette Umfang 23-30 cm,2 Anschlüsse	2	€69,00			

Bestellungen  
per Mail an :



info@schwa-medico.at

mehrere  
Informationen



schwa-medico.at

zzgl.Versandkostenpauschale € 3,50 inkl.MwSt.